


Hengittävä kalvo^{1,2}

Imukykyinen¹ hopeasulfadiatsiinia sisältävä vaahto

Silikonikiinnitteinen haavakontaktipinta

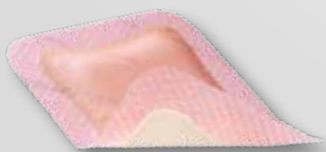

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
Ag Gentle Border

ALLEVYN[®] Ag Gentle Border hallitsee haavaeritettä ainutlaatuisen kolmitoimiteknologian avulla. Se imee, varastoi ja haihduttaa haavaeritettä¹⁻³ luoden optimaalisen kosteuden haavalle ja näin ollen edistää paranemista.³ Hydrosellulaarivaahdon hopeasulfadiatsiini tarjoaa tehokkaan antimikrobisen suojan (demonstroitu *in-vitro*).³

- Erinomainen muotoutuvuus takaa potilasmukavuuden⁵
- Pehmeä silikonikiinnitys, joka minimoi traumaa ja kipua sidoksen vaihdon yhteydessä⁵
- Helppo asettaa ja poistaa - voidaan nostaa ja asettaa uudelleen paikalleen ilman, että sidos menettää kiinnittävyyttään⁵
- Silikonipäälysteinen haavakontaktipinta on ideaalinen haavahoitoon potilaille⁵
- Todistettu *in-vitro* toimivan laajaa bakteerikirjoa vastaa, mukaan lukien antibiootteja vastustavat bakteerit kuten *Pseudomonas*, MRSA ja VRE⁴
- Tarjoaa jopa 7 päivää kestävästä antimikrobisesta suojasta *in-vitro*⁴

Indikaatiot

Pinnallisten, granuloivien, kroonisten ja akuuttien erittävien haavojen hoitoon, kun paraneminen tapahtuu ilman kirurgista sulkua. Syvien ja keskisyvien haavojen, kuten painehaavojen, diabeetikon jalkahaavojen, säärihaavojen, fungaalisten haavojen, infektoituneiden haavojen, pahanlaatuisten haavojen, leikkaushaavojen, ihonottokehtien, iho- vaurioiden sekä ensimmäisen ja toisen asteen palovammojen hoitoon.

Sidoksen asettaminen

Puhdista haava paikallisen käytännön mukaisesti. Valitse sopivan kokoinen sidos. ALLEVYN Ag Gentle Border -sidosta voidaan leikata sopimaan haastaviin alueisiin. Työskentele aina aseptisesti sidosta leikattaessa.

Valmistele ja puhdista haavan ympäristö ja kuivaa liika kosteus pois. Mikäli haavan ympärillä on runsaasti ihokarvoja, tulee ne poistaa, jotta sidos pääsee tarttumaan kunnolla ihoon.

Poista yksi suojakalvoista ja kiinnitä sidoksen tarttuva puoli ihoon.

Poista loput suojakalvosta ja tasoita sidos haavan päälle sidosta venyttämättä. Varmista, ettei sidokseen jää ryppyjä. Sidoksen haavatyyny tulee olla kiinnitettynä kokonaan haavan päälle. Sidos voidaan nostaa ja asettaa uudelleen paikalleen ilman, että se menettää kiinnittävyyttään.

Varmista, että leikatun sidoksen leikkausreunat on peitetty asianmukaisella kalvolla, kuitenkin niin, ettei koko sidos peity.

Sidoksen vaihtoväli

Haavanhoidon alkuvaiheessa sidos tulee tarkistaa paikallisen käytännön mukaisesti. Infektoituneilla haavoilla käytettäessä haavaa tulee tarkkailla ja hoitaa paikallisten ohjeiden mukaisesti. Sidosta voidaan pitää paikallaan jopa 7 päivää lukuun ottamatta sacrum-alueita, jossa sidosta voidaan pitää haavalla enintään 5 päivää haavan ja sitä ympäröivän ihon kunnosta riippuen. Sidos tulee vaihtaa viimeistään silloin, kun haavaerite on 0,5 cm päässä sidoksen haavatyynyn reunasta. Sidoksen vaihtopäätöksen tulee perustua kliiniseen arvioon ja paikallisiin ohjeistuksiin.

Sidoksen poistaminen

Poista ALLEVYN Ag Gentle Border nostamalla yhtä kulmaa ja vetämällä taaksepäin, kunnes sidos on kokonaan irti haavasta.



ALLEVYN - Proud to put people first

For patients. For budgets. For today.®

Edistynyt haavanhoito
Smith & Nephew Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. 0207 866 300
Fax. 0207 866 320

www.smith-nephew.com
yhteydenotto@smith-nephew.com

*Smith & Nephew'n rekisteröity tuotemerkki
© Smith & Nephew tammikuu 2014
14-01493-FI



Kontraindikaatiot

- Ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä sulfalle.
- Koska sulfonamidien tiedetään aiheuttavan kernikerusta, ALLEVYN Ag Gentle Border -sidosta ei saa käyttää naisilla, jotka synnyttävät tai joilla synnytysketki on lähellä tai jotka imettävät, eikä keskosilla tai vastasyntyneillä vauvoilla ensimmäisten kuukausien aikana.

Varotoimenpiteet

- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Älä käytä ALLEVYN Ag Gentle Border -sidoksen kanssa hapettavia aineita, kuten hypokloriittiliuoksia (esim. EUSOL) tai vetyperoksidia, sillä ne voivat hajottaa sidoksen imukykyisen polyuretaanikomponentin.
- ALLEVYN Ag Gentle Border -sidos ei välttämättä ole yhteensopiva paikallisten antimikrobiaineiden kanssa.
- Kliinisen infektion kohdalla paikallinen hopea ei korvaa systeemisen hoidon tai muun riittävän infektioidon tarvetta.
- Kuten kaikkien kiinnittyvien tuotteiden kohdalla, haavaa ympäröivän ihon ärsytystä ja maseraatiota saattaa esiintyä. Jos punoitusta tai ärsytystä on havaittavissa, keskeytä hoito ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Sidoksen asiointi käyttöä tai vaihtamista liian usein voi johtaa ihon repeämiseen erityisesti haavahoitoon potilailla.
- Vältä kosketusta elektrodien tai johtavien geelien kanssa elektronisten mittaustoimenpiteiden, kuten EEG- tai EKG-mittausten, aikana.
- Jos ALLEVYN Ag Gentle Border -sidosta käytetään potilailla MRI-kuvausten (magneettikuvaus) aikana, potilas saattaa tuntea lievää lämpöä.
- ALLEVYN Ag Gentle Border -sidos ei ole yhteensopiva öljypohjaisten tuotteiden, kuten vaseliinin, kanssa.
- ALLEVYN Ag Gentle Border -sidos ei sovellu käytettäväksi yksinään ontelohaavoissa, mutta sitä voidaan käyttää ontelohaavojen päällä toissijaisena sidoksena.
- Kuten kaikkien hopeasulfadiatsiinia sisältävien tuotteiden kohdalla, seuraavia toimenpiteitä täytyy noudattaa etenkin silloin, kun sidoksella peitetään suuri alue:
 - Noudata varovaisuutta niiden potilaiden kohdalla, joiden munuais- ja maksan toiminta on heikentynyt merkittävästi,
 - Noudata varovaisuutta niiden potilaiden kohdalla, joilla tiedetään olevan glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi,
 - Systemisesti annettavien lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua. Tämä koskee erityisesti oraalista hypoglykeemisia aineita ja fenytoiineja. Näiden lääkkeiden kohdalla on suositeltavaa, että veriarvoja tarkkaillaan, sillä lääkkeiden vaikutukset saattavat tehostua.
- ALLEVYN Ag Gentle Border on kertakäyttöinen tuote.

Tilastiedot

Tuotenumero	Koko	Kpl/ltk
66800436	7,5 x 7,5 cm	10
66800437	10 x 10 cm	10
66800438	12,5 x 12,5 cm	10
66800439	17,5 x 17,5 cm	10

Viitteet

1. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: DS/08/098/R1b, ALLEVYN Ag gentle Border Dressings Physical Properties. Carpenter S. Nov. 2008.
2. Smith & Nephew Technical Justification AG 007
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Ag Gentle Border and the moist wound environment (Dave Myers) April 2009.
4. Smith & Nephew Research Centre Report Ref: RR-WMP07330-10-03. The equivalence of the antimicrobial efficacies of the ALLEVYN Ag foam variants against key wound pathogens. Driffield K., Woodmansey E. 25/03/09.
5. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: HVT050 Results from an open, prospective, randomised, within volunteer, comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S & Smith G. Dec. 2008.