




Hillrom™

Puhdistusopas

Lämpömittarin runko

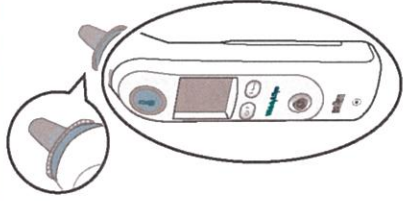


HUOMAUTUS Aseta lämpömittariin uusi anturiuojus ennen puhdistamista.

Hyväksytyt puhdistusliuokset

- 70-prosenttinen isopropyyl- tai etyylialkoholi
- Vetyperoksidi (Virox, Oxivir)
- Kvaternaariset ammoniumyhdisteet (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes™, Sanicloth)
- 10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

1

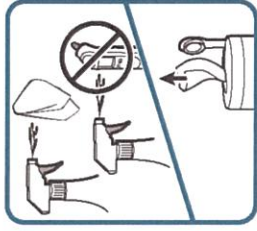

2




3



 Pyyhi kuivaksi. Anna kuivua 5 minuuttia. Varmista ennen käyttöä, että lämpömittarin runko on kuiva.


Lämpömittarin kontaktiosat

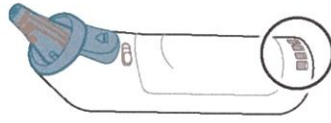

Hyväksytyt puhdistusliuokset

- 70-prosenttinen isopropyyl- tai etyylialkoholi

1

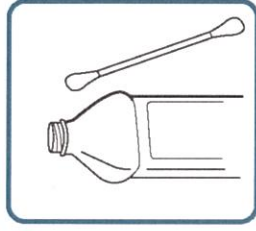


2



 Aseta lämpömittari sivuun yhden minuutin ajaksi, jotta kontaktiosat kuivuvat.


Linssin ikkuna ja anturi

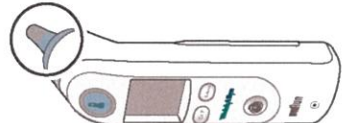

Hyväksytyt puhdistusliuokset

- Vain 70-prosenttinen isopropyyl- tai etyylialkoholi

1

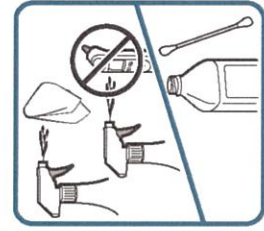


2



3



 Pyyhi kuivaksi. Anna kuivua 5 minuuttia. Varmista ennen käyttöä, että anturin linssin ikkuna on kuiva.

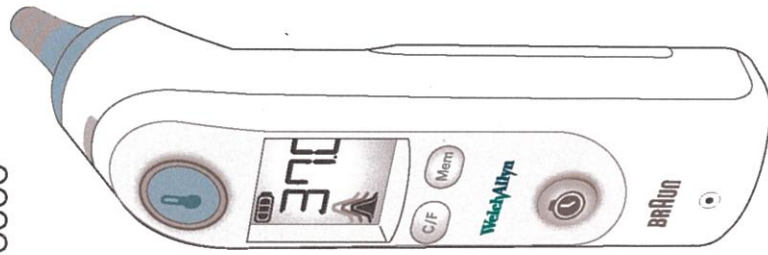

BRAUN

ThermoScan®
PRO 6000

80028371, versio A
Muokauspäivämäärä: 2021-04
©2021 Welch Allyn, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.



hillrom.com

Welch Allyn, Inc. on valmistanut tämän tuotteen Braun-tavaramerkin lisenssillä. Braun on Braun GmbH (Kronberg, Saksa)-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Thermoscan on Helen of Troy Limitedin omistama rekisteröity tavaramerkki.

Hillromin tekninen tuki

hillrom.com/en-us/about-us/locations/
Welch Allyn, Inc. on Hill-Rom Holdings, Inc:n tytäryhtiö.